



拍照流程

数码单反相机和可换镜头的无反相机

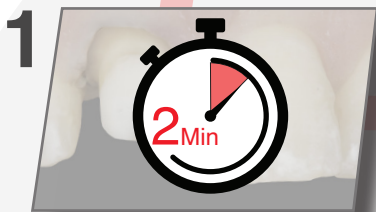


1 注意牙齿的脱水问题！牙齿暴露在空气中的时间超过2分钟后即开始脱水，则须择日进行比色照片的拍摄。

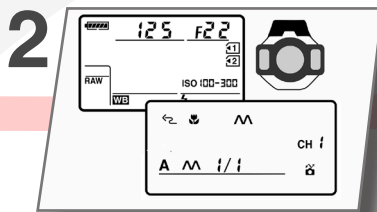


2 使用polar_eyes偏振镜时请关闭E-TTL功能！拍照时请使用手动模式，并将闪光功率设置为1/1。照片格式应设置为RAW格式（非JPEG格式）。



3 拍照时请使用唇拉钩，并朝向耳朵方向的后上方进行牵拉。磨砂黑色唇拉钩用于比色照片拍摄较为理想。

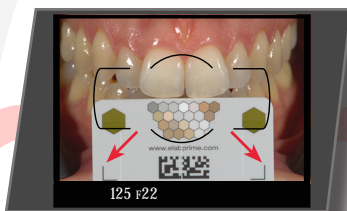


5 确保白平衡卡位于取景框内，且左、右侧下方的裁剪框都能被捕捉到。

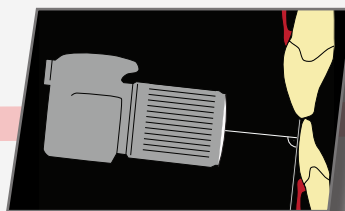

4 相机的光轴应垂直于白平衡卡。



6 将白平衡卡置于切缘下方，并用polar_eyes偏振镜拍摄一张正交偏振下的照片。

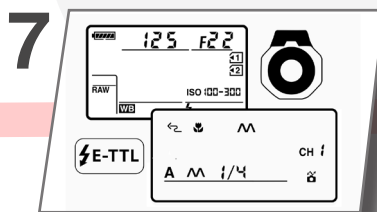


7 在不使用polar_eyes偏振镜拍摄时，闪光灯的功率应在手动模式下减为1/4，或直接使用E-TTL功能。



8 拍摄一张直接比色照片，为技工制作提供牙齿表面纹理和光泽度的信息。



10 使用偏振镜拍摄时，要确保左、右侧下方的裁剪框都被捕捉到。

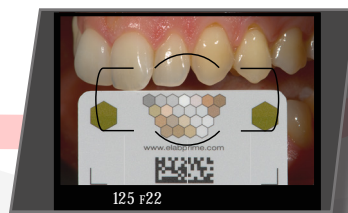

9 如果目标比色牙为侧切牙或尖牙，需要根据牙位及时调整白平衡卡放置的位置。